

MASSZÁZSÁGY



Fa konstrukciós
modell



Fém konstrukciós
modell

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Biztonsági útmutatások

1. Ellenőrizze le rendszeresen az ágy állapotát. Győződjön meg róla, hogy egyetlen rögzítés vagy csavar sem lazult ki, görbült vagy tört el stb.
2. Soha ne terhelje túl az ágyat. Az ágy maximális teherbírására vonatkozó tudnivalókat megtalálja az útmutató második oldalán.
3. Ellenőrizze, hogy az ágy egyenes felületen mind a négy lábával stabilan és egyenesen áll-e.
4. A fentebb közölt biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez vezethet.


A masszázstágy felállítása

Fordítsa oldalra a masszázstágyat, engedje ki a pántokat, nyissa szét félig az ágyat és vegye ki a tartozékokat (1. kép).



1. kép

Álljon az ágy mellé (a párnázott feléhez), fogja meg mindkét fogantyút és óvatos mozdulattal nyissa szét az ágyat. Az ágy lábai automatikusan a helyükre kerülnek (2. kép).

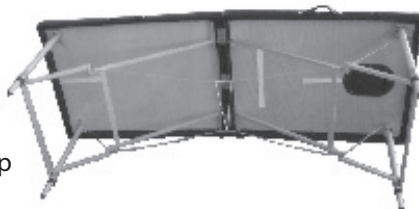

2. kép

Emelje fel az ágyat a közepénél megfogva. Felállítás után ellenőrizze az ágy rögzítését és stabilitását. Ha az ágy közepén meghajlik, ellenőrizze a rögzítő vázat.

Tartozékok

Kiegészítő fejtámla:

A kiegészítő fejtámla a fej és arc kényelmesebb elhelyezkedését és megtámasztását teszi lehetővé. A fejtámla a csavar segítségével többféle magasságba és szögbe állítható az aktuális igény szerint (3. kép).



3. kép

Kiegészítő kéztámasz:


A kiegészítő szalagokkal rögzített. A támla magassága igény szerint szabályozható (4. kép). Megkönnyíti a tarkó és váll masszírozását.



4. kép

Kiegészítő oldalsó kartámasz:

Oldalsó kiegészítő kartámasz az ágy kiszélesítésére szolgál a páciens nagyobb kényelmét szolgálva. A kartámasz az oldalsó nyílásoknál rögzíthető az ágyhoz.

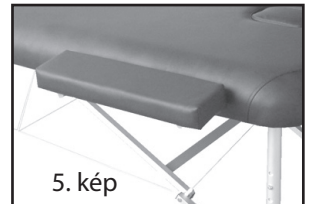

5. kép

Maximális terhelhetőség

A páciens fektesse az ágy közepére, hogy súlya egyenletesen és stabilan elosztsódjon az ágy felületén. Az ágy maximális terhelhetősége 250kg.

Az ágy terhelhetősége a páciens testsúlyának és a masször által kifejtett erőnek a kombinációja. Egy 185kg testsúlyú páciens esetén az ágy 250 kg-os terhelhetősége mellett a masször által lefele irányban kifejtett nyomás értéke 90kg lehet. Oldalirányú nyomás esetén az érték nem lépheti túl a lefele irányban kifejtett nyomás értékének 50 %-át.

NE TERHELJE TÚL AZ ÁGYAT A MEGENGEDETTNÉL NAGYOBB MÉRTÉKBEN!

Soha ne lépje túl az ágy terhelhetőségi küszöbét, kerülje az ágy meghibásodásának veszélyét és a balesetek kockázatát.

Tárolás

A tartozékokat rögzítse az eredeti tároló helyükön (6. kép). Az ágy tárolásához és szállításához használja az eredeti tárolótáskát. A masszázsgyógyszert száraz, hűvös helyen tárolja, ahol nem érheti közvetlen napfény. Ne tegye ki az ágyat szélsőséges hőhatásoknak (forróság vagy fagy) és nedvesség hatásának.



Tisztítás és karbantartás

Napi tisztítás:

A tisztításhoz használjon egyszerű szappanos vizet, törölje át az ágy felületét nedves törölkendővel, majd törölje szárazra.

Fertőtlenítés:

Az ágyat időnként fertőtlenítse le, isopropanol hatóanyagú fertőtlenítő szerrel (polyurethan vinyl tisztítására alkalmas anyag).

Foltok eltávolítása:

Az esetleges foltok eltávolításához használhat enyhe, nem maró hatású tisztítószereket. A tisztítószert egy puha törölkendő segítségével vigye fel az ágy felületére, távolítsa el a foltot. Ezután a felületet meleg vízzel tisztítsa meg és törölje szárazra. A makacsabb foltok eltávolítását bízza szakemberrel. A nem megfelelő folteltávolítás végleges elszíneződéshez vagy egyéb felületi sérüléshez vezethet.

Alumínium konstrukció:

Hagyományos, fém felületek tisztítására szolgáló szerekkel tisztítható.

Fa konstrukció:

A fa konstrukció speciálisan kezelt felülettel rendelkezik, így nem igényel speciális felületi karbantartást. Védje a fa konstrukciót víz és nedvesség hatásától, tisztításához mindössze száraz portörölkendőt használjon. Az esetleges nagyobb szennyeződések eltávolításához vásároljon speciális fapelületek tisztítására szolgáló szert. Ha a fa konstrukciót víz éri, azonnal törölje szárazra a felületet.

Figyelmeztetés

- A különböző felületek tisztítására szolgáló speciális szerek használatakor mindig tartsa be a tisztítószert gyártójának utasításait a szer használatát illetően.
- Ne használjon alkoholos tisztítószereket és egyéb vegyszereket az ágy felületének tisztítására, amelyek károsíthatják a felületet.
- A masszázsgyógyszert nem alkalmas gyógyászati célokra.

Műszaki jellemzők:

Fa konstrukciós modell

Az ágy tömege: 14kg

Az ágy méretei: hossza 186cm x szélessége 62cm

Szabályozható magassága: 58-85cm

A párna vastagsága: 4cm

Mérete becsomagolás után: 93x17x63cm

Maximális teherbírása: akár 250kg

Fém konstrukciós modell

Az ágy tömege: 16kg

Az ágy méretei: hossza 186cm x szélessége 71cm

Szabályozható magassága: 58-85cm

A párna vastagsága: 5cm

Mérete becsomagolás után: 93x18x72cm

Maximális teherbírása: akár 250kg

Szerviz

Ha a termék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra.