

NÉGYKEREKES KOMFORT 2v1 JÁRÓKÉSZÜLÉK

A TERMÉK CÉLJA

Ez a járókeret mozgáskorlátozott személyek számára alkalmas. Segédeszközként is használható az ambulanciális ellátás megkönnyítésére. Határozottan nem használhatják olyan személyek, akiknek nyilvánvaló kéz- és vállproblémáik vannak, valamint egyensúlyzavarral küzdő személyek. A járókeret beltéren és kültéren egyaránt használható. Javasoljuk, hogy sík felületen használja, ahol minden kerék érintkezik a talajjal. Nem használható kőfelületen vagy ferde síkon, mert a járókeret instabillá válhat. A készülék nem alkalmas emberek vagy tárgyak szállítására.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja a terméket a kézikönyvben megadottaktól eltérő célokra. A gyártó és a szállító nem vállal felelősséget az e felhasználói kézikönyvvel ellentétes termékhasználatból eredő esetleges károkért. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosítsa és átalakítsa a terméket.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Soha ne szerelje be és ne használja a készüléket, mielőtt elolvasta és megértette ezt a kézikönyvet. Ha nem érti a figyelmeztetéseket, figyelmeztetéseket vagy utasításokat, forduljon kereskedelmi képviselőjéhez vagy a műszaki személyzethez, mielőtt megkísérelné a készülék beszerelését, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a készülék károsodását.

FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉSEK

- Győződjön meg arról, hogy a fék bowdenkábel megfelelően van beállítva.
- Minden magasságbeállítás után ellenőrizze a fék megfelelő működését, hogy elkerülje a fékkábel esetleges helytelen vezetését vagy meghajlását.
- Ezen alapvető szabályok megsértése személyi sérüléseket okozhat.
- A járógépet csak kemény és egyenletes felületen szabad használni. Ne használja a készüléket lépcsőn való fel- és lejáráshoz.
- Mindig tartsa meg az egyensúlyát mindkét fogantyún.
- Különös figyelmet kell fordítani a nedves, jeges vagy havas felületeken való mozgásra.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Ne használja a széket személyek vagy anyagok szállítására, a szék csak álló helyzetben való ülésre szolgál, és csak bekapcsolt rögzítőfékkel használható. (A féknek folyamatosan bekapcsolt állapotban kell lennie.)
- A járókeret megfelelő egyensúlyának és a maximális biztonságának a biztosítása érdekében minden keréknek folyamatosan érintkeznie kell a felülettel.
- A szék használata előtt a járógépet fékezni kell.
- **Megjegyzés:** Ha a járógépet mozgásképtelen helyzetben támaszként használják, a kézféket be kell kapcsolni. A járógépet állandóan fékezve kell tartani.

TERHELHETŐSÉG:

A járógép 100 kg-ig terjedő testsúlyú személyek által használható, a tárolózsákkal együtt. A tárolózsák maximális teherbírása 5 kg.

ÖSSZESZERELÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS:

- Ellenőrizze, hogy a összecukott állapotból való kinyitás után a járókeret mindkét része maximálisan kinyílt-e, és a két rész közötti távtartó a végállásig van-e rögzítve és vízszintes helyzetben van-e.
- Mindkét fogantyút biztonságosan rögzíteni kell a fő rész csőveiben műanyag fejű csavarokkal.
- Ne akasszon semmit a járógép vázára – sérülésveszély áll fenn. A váz sérülése működési zavarokat, irányíthatóságot és ezáltal sérüléseket okozhat.
- A járógép kinyitásakor és összecukásakor legyen óvatos, és kerülje az ujjak és/vagy ruházat beszorulását.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS



HASZNÁLAT ELŐTT

Mindig ellenőrizze:

Hogy a járókeret minden része biztonságosan rögzítve van-e.

Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.

Győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően van-e rögzítve.

Ellenőrizze, hogy az ülés megfelelő helyzetben van-e.

Ellenőrizze, hogy mindkét fék megfelelően működik-e.

Ellenőrizze a termék alkatrészeinek kopását, hogy a termék teljesen biztonságos legyen a felhasználó és környezete számára.

MONTÁZ ELŐTT

Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Ha sérülés tapasztalható, ne használja a terméket, és forduljon a kereskedőjéhez.

A MODELL ÖSSZESZERELÉSE

A járógép összerakása

Hajtsa ki a járógépet úgy, hogy mindkét keretrészt maximálisan kinyújtja, és rögzítse az oldalsó támasztékokat a részek között, hogy vízszintes helyzetben legyen. Helyezze be a csöveket a keretbe, és rögzítse őket, lásd az alábbi leírást.

A fogantyúk beállítása

Állítsa be a fogantyúk magasságát a műanyag fejű oldalsó csavarokkal, amelyeket a fogantyúk csöveinek megfelelő nyílásokba kell behelyezni. Csavarja ki a csavart, és húzza ki a keretcsőből, helyezze a fogantyúkat a kívánt magasságba, csavarja vissza a csavart a keretcsőn és a fogantyúcsövön keresztül a kiválasztott magasságnak megfelelő lyukba, majd forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza meg újra. Ismételje meg a másik fogantyúval, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú ugyanolyan magasságban van.

FIG. 11

Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk helyzete összhangban van a járókeret mozgásának irányával. Ha a fogantyú nem marad egyenes, fennáll a veszélye, hogy a járókeret remegni kezd vagy felborul, különösen akkor, ha nagyobb erővel tolja. Ezért a fogantyúk csöveinek rögzítőcsavarjait szorosan meg kell húzni.

A támasztókar felszerelése:

Helyezze a támasztókar mindkét végét a vázcsövek hüvelyéibe. A támasztót így a váz mindkét oldalára lehet helyezni, és így kiválaszthatja az ülés oldalát. Az elülső ülés változatánál használható az alsó lábtámasz, amelyet használaton kívül a járókeret felé lehet lehajtani.

A járógép összecukása

Húzza felfelé az oldalsó távtartó karokat, és tolja össze a keret mindkét részét. Ügyeljen arra, hogy ne szoruljanak be az ujjai, és ne akadjon be a ruhája.

Bevásárlókosár

A bevásárlókosár két kampóval van rögzítve a járókerethez.

FIGYELMEZTETÉS: A kosarat csak apró tárgyak tárolására használja. Ne töltse túl a kosarat, mert felborulhat!

Ülés

Mielőtt leülne, helyezze a járógépet egy sík és szilárd felületre, majd rögzítse a féket. Győződjön meg arról, hogy a fékek szilárdan rögzítve vannak, és a járógép stabil helyzetben van.

FIGYELMEZTETÉS: Üljön úgy, hogy súlya egyenletesen oszlik el az ülésen. Ne üljön csak az egyik oldalra.

Gyakorlati használat

- Kezdje el tolni a járógépet, amikor egyenes testhelyzetben van, és mindkét keze a fogantyúkon van.
- Győződjön meg arról, hogy kezei szárazak, hogy elkerülje a csúszás veszélyét.
- Séta közben tartsa egyenes testtartást, tekintetét előre, ne lefelé irányítva.
- Ne tolja a járógépet túl messzire a testétől, mert ez eleséshez és helytelen terheléshez vezethet.
- Ne használja a járógépet 20 mm-nél magasabb akadályok leküzdésére.
- Külső használat esetén inkább a járdákat válassza.

Fékek

Hogyan kell fékezni

A járógép fékezéséhez húzza fel a fékkart az ujjával, amíg a járógép lelassul vagy megáll. A mozgás folytatásához engedje el a fékkart.

A fék reteszelése

Nyomja le a fékkart. Amikor „kattintást” hall, a kerekek reteszelődtek. **FIGYELMEZTETÉS:** Ha nem halad a járógéppel, mindig reteszelje a kerekeket.

A kerekek feloldása

Húzza meg mindkét fékkart, amíg a fékek ki nem oldódnak.

KARBANTARTÁS

Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel. A javításokhoz csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjunk. A termék élettartama a használatától, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Tisztítás

Az alkatrészek tisztításához csak nedves törlőkendőt és semleges tisztítószerrel használjon. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek olyan anyagok használatával keletkeznek, amelyek a tisztítás során károsíthatják a termék felületét, vagy korrózív vegyszerekkel.

Fertőtlenítés

Szükség esetén fertőtlenítse a terméket szokásos fertőtlenítőszerrel. Ne használjon súrolószereket, savakat, alkoholt és klór alapú tisztítószerrel, fertőtlenítőszerrel és acetont, amelyek helyrehozhatatlan károsodást okozhatnak a profil felületén.

Kerék karbantartása

Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Szárítsa meg őket tiszta ruhával. A kerekek csapágyakkal vannak felszerelve, amelyeket időnként meg kell kenni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kód produktu										
Sedadlo	34x38 cm									
Konstrukce	ocel									
Rozměry a hmotnost										
Rozměry v cm										
	70	85 92	54	63	57	65x21x84	5			max. nosnost 100 kg

Környezetvédelem

A termék élettartamának lejártát követően, vagy ha a javítás nem lenne gazdaságos, ne dobja a terméket a háztartási hulladékba. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a hulladékok nem megfelelő ártalmatlanításából eredő, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális káros hatásokat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint bírság szabható ki.

Szerviz

Ha a termék megvásárlása után bármilyen hibát észlel, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati utasításban szereplő utasításokat. A reklamációt nem vesszük figyelembe, ha a terméket módosította, vagy nem követte a használati utasításban szereplő utasításokat.

A garancia nem vonatkozik

- termék funkcionális alkatrészeinek természetes kopása a szokásos használat következtében
- termék szokásos karbantartásával kapcsolatos szervizelési beavatkozásokra (pl. tisztítás, a szokásos kopásnak kitett alkatrészek cseréje)
- külső hatások (pl. éghajlati viszonyok, porosság, nem megfelelő használat stb.) által okozott hibákra
- termék leeséséből, ütközésből, ütésből stb. eredő mechanikai sérülésekre
- termék nem szakszerű kezelése vagy a használati utasításnak nem megfelelő használata, túlterhelés, nem megfelelő vagy nem eredeti alkatrészek használata, nem megfelelő vagy nem eredeti kiegészítők vagy nem megfelelő szerszámok használata stb. következtében keletkezett károokra
- nem eredeti adapterek használatából vagy az eredeti adapter más termékhez való használatából eredő károokra. Mindig be kell tartani az egy terméken belüli kölcsönös kompatibilitást.

A reklamált termékek esetében, amelyek szállítás közben nem voltak megfelelően védve a mechanikai sérülésektől, a károsodás kockázatát kizárólag a tulajdonos viseli. A szállító fenntartja a jogot a használati utasítás esetleges módosítására, és nem vállal felelősséget az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrázolás és a leírás a modelltől függően eltérhet a valóságtól.

Magyar kézikönyv letöltése innen: [Descarca manualul in romana de aici](#)
Slovenský návod na stiahnutie tu: [Instrukcia w języku polskim do pobrania tutaj](#)

